



**Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasączone bacytracyną  
(a' 0,04j bacytracyny w krążku)  
do identyfikacji *Streptococcus pyogenes***

### **Sposób postępowania:**

- do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller Hinton II Agar zawierające 5% krwi baraniej
- doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
- przygotować zawiesinę (z hodowli stałej lub płynnej) badanego szczepu paciorkowca  $\beta$ -hemolizującego o gęstości 0,5 McFarlanda
- tak przygotowaną zawiesinę posiać na podłoże i jałowymi szczypcami umieścić centralnie krążek diagnostyczny SP
- płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
- hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze tlenowej

### **Interpretacja wyników:**

- po zakończeniu inkubacji obserwować wystąpienie lub brak strefy zahamowania wzrostu wokół krążka z bacytracyną SP
- jako wrażliwe uważa się szczepy, których średnica strefy zahamowania wzrostu wokół krążka wynosi 11 i powyżej 11 mm - należy je zidentyfikować jako *Streptococcus pyogenes*

Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy przeprowadzić kontrolę wobec szczepów wzorcowych:

#### **Dla szczepów wzorcowych**

*Streptococcus pyogenes*

*Streptococcus*  $\beta$ -hemolityczny gr. B

**ATCC 19615**

**ATCC 12386**

#### **strefa zahamowania wzrostu (w mm)**

**13-19 mm**

**9 mm**

**Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.**

**Opakowanie zawiera 50 krążków.**

**Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach w temperaturze 2-10°C  
do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu**

**W okresie ważności wyrób może być transportowany do 7 dni w temperaturze pokojowej**

**Producent:**



Centrum Badań Mikrobiologicznych  
i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra  
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17  
tel.(12) 421-78-36, zamowienia@cbm.com.pl  
www.cbm.com.pl

